



SISTEMI E PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO E LA RIANIMAZIONE

SCHEDA TECNICA

GEL ANTIUSTIONI CODICE PRE002 E GARZE ANTIUSIONI CODICE GAZ101

•	COMPOSIZIONE DELL' IDROGEL
	Acqua purificata, glicerina, crosspolimero acrilato, EDTA disodico, trietanolammina

- STERILITA'
 Irraggiamento con raggi gamma
- DATA DI SCADENZA
- PH IDROGEL
 5,5 -7,0

5 anni

- BIODEGRADABILITA' IDROGEL
 100%
- ASPETTO DELL'IDROGEL Liquido, trasparente
- ODORE IDROGEL
 Senza odore
- COMPOSIZIONE SUPPORTO GARZE
 Schiuma poliuretanica con struttura a cellule aperte incatenate.

= +39 0291600149 Email: info@pvs-spa.it Web: www.pvs-spa.it





SISTEMI E PRODOTTI PER IL PRONTO SOCCORSO E LA RIANIMAZIONE

ATTENZIONE:

- ✓ Non strofinare il gel sull'area interessata.
- ✓ Non riutilizzare.
- ✓ Solo per uso esterno.
- ✓ Se compaiono irritazioni, smettere l'utilizzo.
- ✓ Conservare in un luogo fresco.
- ✓ Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- ✓ Non aderisce all'area bruciata
- ✓ Non è tossico.
- ✓ Promuove la guarigione, inumidisce, raffredda e lenisce.

MODALITA' D'USO:

- Aprire la bustina o rimuovere la medicazione.
- ✓ Applicare il gel o la garza sulla zona interessata. Non strofinare.
- ✓ Coprire se necessario.
- ✓ Se il dolore persiste contattare un medico

CONFEZIONI

PRE002: bustine da 3.5g GAZ101: garze da 10 x 10 cm

20060 CASSINA DE PECCHI (MI)

Via Leonardo da Vinci,18

_

Email: info@pvs-spa.it Web: www.pvs-spa.it